



dry-cap uv 2.2®

Elektronische Trockenhaube für alle Hörsysteme.

Die neue dry-cap uv 2.2® ist eine elektronische Trockenhaube mit integrierten UV-C Leuchtdioden für hygienische Reinigung. Sie trocknet und pflegt alle Arten von Hörsystemen und In-Ear Kopfhörern durch einen kraftvollen Ventilator und sanfter Wärme.

PERFEKTE TROCKNUNG

Feuchtigkeit, Körpersekrete und Cerumen können die Funktion von Hörsystemen stark beeinträchtigen und zu Ausfällen führen.

Die Trocknung erfolgt primär durch einen Ventilator, der Raumluft auf Hörsysteme und Ladegerät gelenkt. Die Trocknung wird verstärkt, indem die Luft auf bis max. 35°C vorgewärmt wird. Dadurch kann mehr Feuchtigkeit aufgenommen werden und das führt zu noch besseren Trocknungsergebnissen, ohne die Akkus von Hörsystemen zu schädigen.

Die zwei Trockenprogramme bieten mehr Flexibilität. Der Dry&Clean Modus (linke Taste) ist ein Automatikprogramm und kombiniert Ventilator-Trocknung mit UV-C-Licht am Anfang und am Ende der Trocknungszeit. Der Clean Modus (rechte Taste) ist ein Kurzzeit-Hygieneprogramm und startet das optimierte UV-C-Licht, bei dem wirkungsvoll bis zu 99,99 % aller Keime, Bakterien und Pilze eliminiert werden.

MODERNE HYGIENE

Die vier UV-C Leuchtdioden strahlen mit 275 nm Wellenlänge durch einen breiten Öffnungswinkel, so dass in nur 5 Minuten 99,99% alle Viren, Bakterien und Pilze eliminiert werden. Dies wurde von einem akkreditiertem Institut mit Zertifikat bestätigt. Die 2 Phasen zu Beginn und am Ende der Trockenzeit garantieren Keimfreiheit, auch wenn die Hörsysteme zwischenzeitlich entnommen werden.

Die neue dry-cap uv 2.2® ist ein Medizinprodukt und erfüllt die hohen Anforderungen an Medizinprodukte (Klasse I) der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.



Primäre
Trocknung durch
Luftgebläse



Sanfte Wärme
bis 35°C für
optimierte Trocknung



Hygiene
durch 4 x UV-C
LEDs



Einfachste
Bedienung durch
taktile Tasten



Trocknen, Reinigen
und Aufladen durch
USB-C



Schwerkraftsensor
für Sicherheits-
Abschaltung



Automatische
Abschaltung
nach 2 Stunden



Alle Funktionen
überwacht durch
Mikroprozessor



Höchste Produkt-
qualität mit
2 Jahren Garantie



Energiesparend,
schonend und
absolut sicher

HIGHLIGHTS




DESIGN

Die patentierte dry-cap uv 2.2® als Haube ermöglicht Trocknung, hygienische Reinigung und Laden von allen aufladbaren Hörsystemen unabhängig von der Bauform der Ladestation. Größe und Design der dry-cap uv 2.2® sind so konzipiert, dass die Hörsysteme und Ohrstücke perfekt getrocknet und hygienisch gereinigt werden.

STARKER LUFTSTROM + WÄRME

Die neue dry-cap uv 2.2® wurde bei der Trocknung weiter perfektioniert. Neben dem Hochleistungs-Ventilator sorgt ein Sensor-gesteuerter Heizleiter für Wärmezufuhr bis max. 35°C, ohne die Akkus der Hörsysteme zu beeinträchtigen. Da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann werden so maximale Trockenergebnisse erzielt.

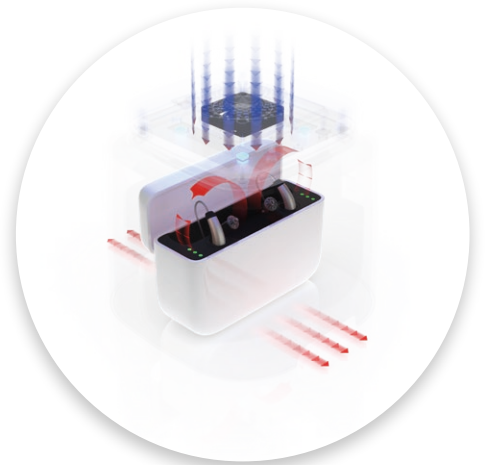

PASST FÜR VIELE LADESTATIONEN

Die neue dry-cap uv 2.2® ist universell für alle Hörsysteme (wiederaufladbare und Batterie-betriebene) sowie für Cochlea Audio-Prozessoren und In-Ear Monitore geeignet. Öffnungen in der Haube erlauben flexible Kabelführung zum Laden von Hörsystemen zeitgleich zur Trocknung der Hörsysteme.



WELTWEITER EINSATZ

Die neue dry-cap uv 2.2® punktet weiter mit einem Universal USB-Netzteil mit 4 länderspezifischen Adaptern. Dadurch wird ein weltweiter Einsatz ermöglicht. Zwei USB-Anschlüsse lassen zeitgleich das Trocknen, die Hygiene und das Wiederaufladen an nur einer Steckdose zu.



USB-C STANDARD UND SICHERHEIT

Ob zu Hause oder unterwegs, die neue dry-cap uv 2.2® arbeitet auf 5V-USB Basis und wird per Standard USB Typ-C® Anschluss betrieben. Integrierte Funktionen wie die Eingangsspannungssteuerung und die automatische Abschaltung bei Neigung des Geräts durch einen 3G-Sensor erhöhen die Sicherheit.

